


**1** Druk op ON/OFF om de pomp aan te zetten

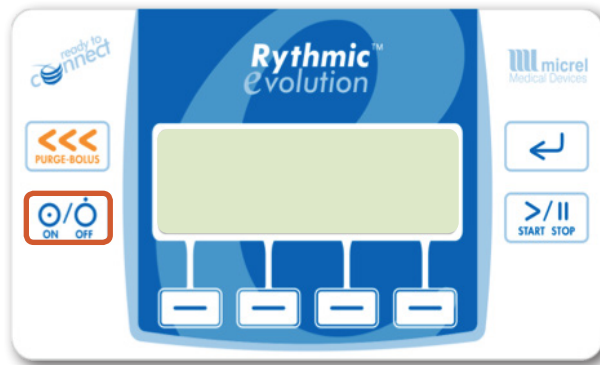


# Rythmic™ Evolution Quick Manual

**2** Voer de programmeercode in



Invoeren en bevestigen met

**3** Maak uw keuze

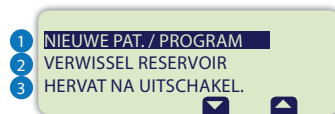

Selecteren met

**1**

NIEUWE PAT. / PROGRAM  
VERWISSEL RESERVOIR  
HERVAT NA UITSCHAKEL.

SNELHEID:  
**000,0** ml/hr  
UNITS

**i** U kunt de infusie-eenheden in dit scherm wijzigen m.b.v. de softtoets UNITS

Voer de gegevens in

Doorloop het protocol & verander de parameters naargelang het voorschrift

**2**

NIEUWE PAT. / PROGRAM  
VERWISSEL RESERVOIR  
HERVAT NA UITSCHAKEL.

INFUSIE VOLUME:  
**0000** ml

Voer het volume in

INFUSIE  
95 ML GEVRAAGD 12  
GEGEVEN 10

LEGEN


Reset, indien nodig, infusievolume en bolusvragen met gebruik van de LEGEN toets

**3**


NIEUWE PAT. / PROGRAM  
VERWISSEL RESERVOIR  
HERVAT NA UITSCHAKEL.

**4** Infusie starten of hervatten

**i** Klik op PROTOCOL om het volledige infusieprotocol te controleren alvorens te starten met de infusie.

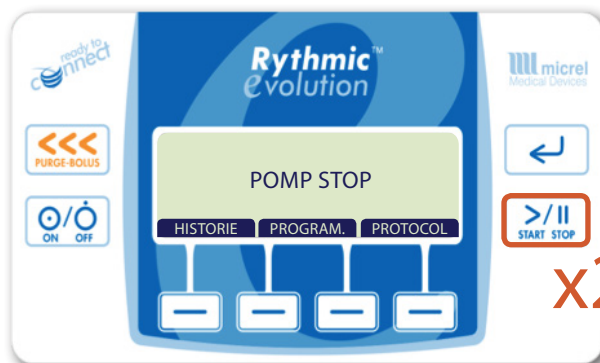

x2

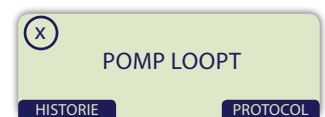


**5** Priming waarschuwing of verplichte priming



Druk op NEE




Druk 2X op deze knop om automatisch 3 ml te primen en druk nogmaals om primen stop te zetten

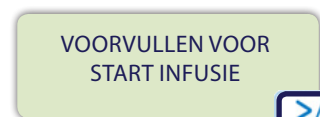

x2

# 6 Programma aanpassen tijdens infusie


ⓘ Pomp niet uitschakelen alvorens programma te veranderen

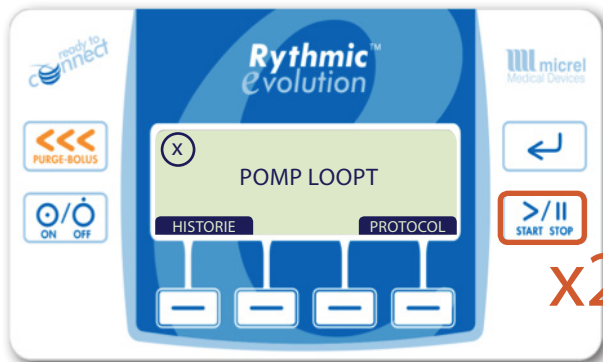

Als 'schermblokkering' geactiveerd is geef de code 0111 in



Kies "PROGRAM."

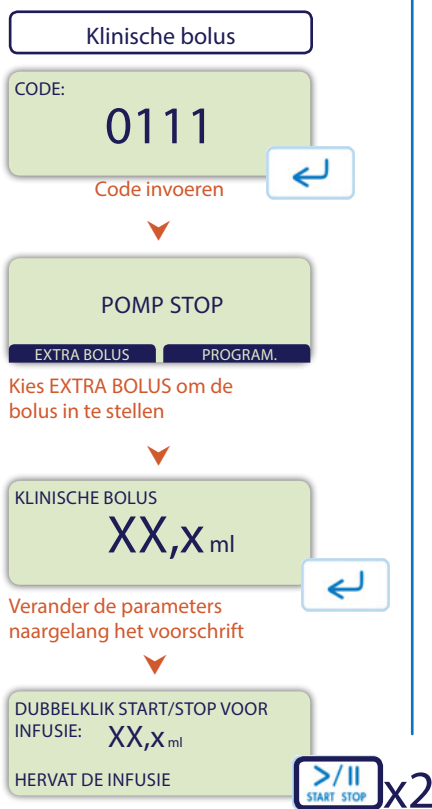

Kies EXTRA BOLUS om de bolus in te stellen

Verander de parameters naargelang het voorschrift




Kies PROGRAM. om het huidige programma te wijzigen.

Verander de parameters naargelang het voorschrift



Voer het volume in

Reset, indien nodig, infusievolume en bolusvragen met gebruik van de LEGEN toets

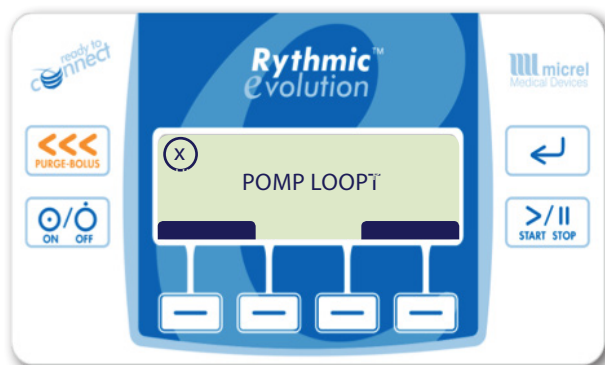

Vrije vertaling. Deze Quick Manual vervangt de handleiding niet.